



# MEHAL

Ein Stück mehr Selbständigkeit

## Beschreibung: Speichenschutzmontage mit Clips

1



Unseren Speichenschützern liegen Befestigungsclips bei um den Speichenschutz auf den Rollstuhl zu befestigen

2



Zuerst muss der Clip mit der Nut in Längsrichtung ausgerichtet werden

3



Dann den Clip behutsam durch die Aussparung führen

4




Am besten mit leichtem, gleichmäßigem Druck, auf beiden Daumen, durch das Loch drücken, bis der Clip richtig sitzt

5



Anschließend den Speichenschutz mit den Clips auf der Rollstuhlspeiche positionieren und ausrichten

6

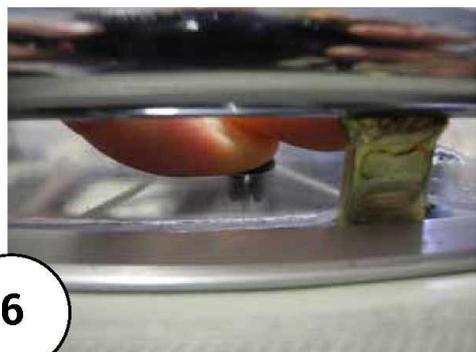

Wenn der Speichenschutz richtig ausgerichtet ist, wieder mit leichtem und gleichmäßigem Druck (wie bei Schritt 3) den Clip andrücken bis er einrastet