

Festlegung der Haltergröße mit Schablone

Für Artikel-Nr.: 01-002-xx und 03-004-xx

Mit der Schablonengröße 50 können die Größe 49, 50 und 51 festgelegt werden



Schablone 50

1. Daumenposition festlegen (empfohlen außerhalb)

Schieben Sie die Schablone mit dem offenen Teil vom Daumen hergesehen über die Hand, so dass sich die Breite der Schablone in der Mitte der Breite des zukünftigen Halters befindet. (siehe Foto 1 und 2)



Foto 1

2. Haltergröße festlegen

Die Schablone muß leicht an der Handinnenfläche und leicht am Handrücken anliegen.

Sitzt die Schablone 50 zu eng, wählen Sie die Haltergröße 51.

Sitzt die Schablone 50 zu locker, wählen Sie die Haltergröße 49.


Sitzt die Schablone 51 zu eng, wählen Sie die Haltergröße 52.

(siehe auch Fotos 3)

Sollte keine der Größen passen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Gegen einen geringen Mehraufwand können wir auch Zwischengrößen produzieren. In der Regel ist aber mit den vorhandenen Größen ein fester Sitz der Halter realisierbar.



Foto 2

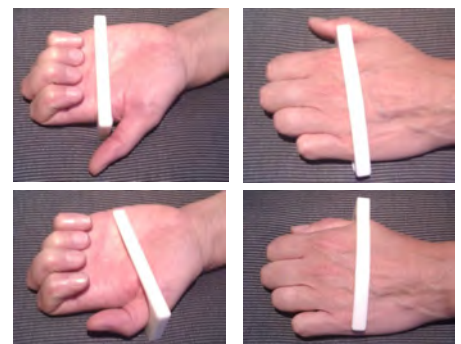

Fotos 3

Die Beschreibung „Festlegen der Haltergröße mit Schablone“ finden Sie auch auf unserer Homepage.